

nazwa [bobo-test płytkowy](#)

producent: **Diagnosis**

cena: **15.90 zł**



**BOBO-TEST płytkowy** - to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu. Test można stosować już po 10 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

#### **▣ Przed przeprowadzeniem testu:**

- Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 0 800 70 30 11 w godz. 8-16 (pn-pt).
- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego).
- Test należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Nie wolno zamrażać testu.
- Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny w temperaturze pokojowej.
- Test należy chronić przed dziećmi.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

#### **Jak działa test?**

Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu HCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak.

Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność HCG już przy stężeniu 25 mIU/ml.

#### **Zawartość opakowania**

W opakowaniu testu Bobo Test znajduje się:

1. Instrukcja użycia
2. Płytko testowa
3. Pipetka

## Odpowiedzi na ewentualne pytania

### Jak wiarygodny jest Bobo Test?

Wiarygodność testu wynosi ponad 99% i odpowiada wiarygodności testu laboratoryjnego.

### Kiedy należy przeprowadzić test?

Test jest w stanie wykryć już 6-dniową ciążę, jednakże ze względu na możliwość naturalnego poronienia we wczesnym etapie ciąży, najlepiej wykonać test pierwszego dnia spodziewanej miesiączki. Największe stężenie hormonu HCG występuje zazwyczaj w moczu porannym, jednak wysoka czułość Bobo-Testu pozwala na jego przeprowadzenie o dowolnej porze dnia.

### Jakie czynniki mogą wpłynąć na wynik testu?

Jeżeli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcją użycia, wynik testu powinien być dokładny. Jednak pewne leki zawierające hormon HCG i niezwykle rzadko występujące choroby mogą fałszować wynik testu. Spożycie alkoholu, przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, leków przeciwbólowych lub antybiotyków nie ma wpływu na wynik testu.

### Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny powinnaś skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Możesz potwierdzić test robiąc go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiętaj, odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ciąży jest ważne, aby zapewnić zdrowie dziecka i matki.

### Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest negatywny?

Negatywny wynik testu oznacza, że hormon HCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeżeli miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni, powinnaś powtórzyć test. Możliwe, że źle wyliczyłaś dzień rozpoczęcia miesiączki.

### Czy wynik testu może się zmienić po pewnym czasie?

Pozytywny wynik testu (ciąża) nie zmieni się nawet kilka dni po wykonaniu testu.

□

**więcej informacji o produkcie na stronie:**

[www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)

□

□